

平成28年3月1日作成（第一版）

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（JMDN：70976000）

ALLONE NITRILE GLOVE

（オールワン ニトリルグローブ）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

主原料：合成ニトリルゴム

指先にエンボス加工を施した、パウダー（滑材）なしの非天然ゴム製の使い捨て検査・検診用手袋である。本品は未滅菌の左右兼手袋である。

〈性能〉

試験項目	老化前	老化後
引張強度 (MPa)	14以上	14以上
切断時の伸び (%)	500以上	400以上

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用するニトリルゴム製手袋である。（歯科用を除く。）

【使用方法等】

箱の取り出し口を開封し、手袋を取り出し装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

体質などによりかゆみ・かぶれ・発疹等のアレルギー症状が現れる場合がある為、その際は使用を中止すること。

（使用後に発症する遅延性アレルギーを含む。）

2. 重要な基本的注意

鋭利な器具等に触れると本品に穴が開いたり破れるおそれがある為、注意すること。

【相互作用】

薬品・溶剤などによっては膨潤や浸透する可能性がある為、使用の際は、十分確認を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、高温・多湿・および直射日光等避け、30度以下の常温で保管すること。

2. 有効期間

製造日より5年間（自己認証による）

※使用期限は本品の包装に記載。

【主要文献及び文献請求先】

住所：〒870-0848

大分県大分市賀来北2丁目16番34号

電話：097-549-4140 FAX：097-549-7470

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

日本ヒューマンメディック株式会社



住所：〒870-0848

大分県大分市賀来北2丁目16番34号

電話：097-549-4140 FAX：097-549-7470