

再使用禁止

販売名 : Nemoa Splint(ネモア スプリント)

【警告】

1. 完全に硬化するまで、無理な力や体重をかけたりしないこと。
[本品が変形、破損し、怪我を引き起こす恐れがあるため。]


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 水温26℃以上の水を使用しないこと。
[本品の硬化には発熱を伴うので、水温が高いと本品の温度が高くなり、低温火傷の恐れがあるため。]
3. 次の患者には慎重に適用してすること。
(1) 本品の材料に過敏症またはアレルギーの既往歴のある患者。
(2) 患部に感染症のある患者[感染症が悪化する恐れがあるため。]

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、水硬化性樹脂をグラスファイバー繊維又はポリエステル繊維に含浸させた固定材(芯材)とそれを覆うパッド等で構成される。

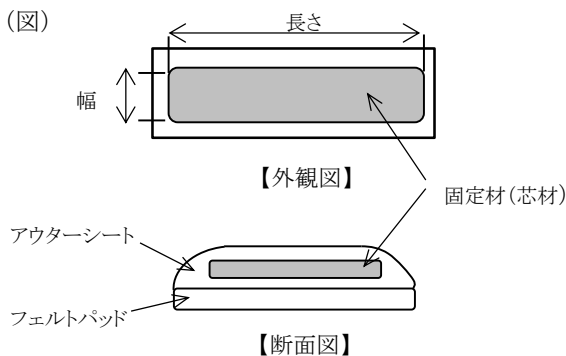

2. 固定材(芯材)の寸法(単位:cm)

〈ロール〉

幅	2.5、5.0、7.5、10.0、12.5、15.0、17.5
長さ	120、200、450

〈カット〉

幅	1.0、1.25、2.5、3.75、5.0、7.5、10.0、12.5、15.0
長さ	20、25、30、38、50、75、88、114

3. 原理

固定材(芯材)が水と反応することにより硬化し、被覆して患部を固定することができる。

4. 原材料

固定材(芯材) : ポリエステル又はグラスファイバー及びポリウレタン樹脂
パッド、シート : ポリエステル

【使用目的、効能又は効果】

固い被覆保護材(ギブス包帯)で骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫を固定するために使用する。

【操作方法又は使用方法】

〈カットタイプの場合〉

- 患部の大きさと状態に合わせて適当なサイズのものを選び、アルミパックから取り出します。
- 本品全体を26℃以下の水に10～20秒間浸します。
- 本品を水から取り出し軽く絞り、手早くタオル等で巻き上げ余分な水分を除いて下さい。
- 本品のフェルトパッド部を患部に適合するよう形を整えます。
- すばやく上から弾性包帯等で固定して下さい。
- 施術後、完全に硬化するまで20分程度は本品に荷重をかけないで下さい。

〈ロールタイプの場合〉

- 患部の大きさと状態に合わせて適当なサイズのものを選び、必要な長さを箱から引き出し、アルミパックごととはさみでカットします。
- カット後、直ちに箱に残った本品の端を数cm折返し収納し、アルミパックの端を専用クリップでしっかり封をして下さい。
- カットした本品をアルミパックから取り出します。
- 本品全体を26℃以下の水に10～20秒間浸します。
- 本品を水から取り出し軽く絞り、手早くタオル等で巻き上げ余分な水分を除いて下さい。
- 本品のフェルトパッド部を患部に適合するよう形を整えます。
- すばやく上から弾性包帯等で固定して下さい。
- 施術後、完全に硬化するまで20分程度は本品に荷重をかけないで下さい。

【使用上の注意】

- 使用する水の温度が低いと、固定までに時間がかかる場合があります。(※使用する水の適温は15～20℃前後です。)
- 水に浸した際、絞って余分な水分をとらないと操作性が悪くなり、固定に時間がかかります。
また、絞りすぎた場合も本品が硬化する際に高温発熱する恐れがありますので、きつく絞りにすぎないようにして下さい。
- 固定材(芯材)の樹脂が皮膚や衣服に付着しないようにして下さい。付着した場合はすぐに洗い流して下さい。
- 本品と患部を固定する際、弾性包帯等をきつく巻きすぎないようにして下さい。
- 一度硬化したものは使用しないで下さい。
- 本品に異常を認めた場合は、直ちに使用を中止して下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 常温で保管し、多湿、水濡れ及び直射日光を避けて下さい。
- 包装に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱って下さい。本品は空気との接触により硬化し始めます。
- 本品に記載してある有効期間を確認し、有効期間を過ぎたものは廃棄して下さい。
- ロールタイプの場合、カット後に箱に残ったものを保管する際は専用クリップでしっかり封をし、クリップが外れないようにして下さい。

2. 有効期間

適切な方法で貯蔵・保管する時、有効期間は製造日より3年間(未開封)

【包装】

(ロール) 1箱/1袋入り(1袋:1巻入り)
(カット) 1箱/5袋入り(1袋:1枚入り) 又は
1箱/10袋入り(1袋:1枚入り)

【主要文献及び文献請求先】

日本ヒューマンメディック株式会社
電話: 097-549-4140 FAX:097-549-7470

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

(1) 製造販売業者:

日本ヒューマンメディック株式会社
住所: 〒870-0848 大分県大分市賀来北2丁目16番34号
電話: 097-549-4140 FAX:097-549-7470

(2) 外国製造業者:

T&L Co.,Ltd. 韓国
T&L(Jiaying) Co.,Ltd. 中華人民共和国

(3) 緊急連絡先:

日本ヒューマンメディック株式会社
電話: 097-549-4140 FAX:097-549-7470