

～最も幅の狭いギプスシーネ～ ※1

ALLONE SPLINT

Cut

オールワン スプリント

フィンガー

FOR NEW MANAGEMENT OF FRACTURE



処置料として490点の算定!!

※保険点数区分: J122 四肢ギプス手指、及び手足(片側)

従来のアルミ製のシーネと違い、
処置料として保険点数の算定が
可能です。



1指用のサイズをご用意!!

ギプスシーネの中では最も幅の狭い※1
0.5inch (1.25cm) を取り揃えております。
サイズラインナップも0.5～1.5inchまで
0.5inch刻みでご用意しております。



繊細な指には専用のシーネを

従来のアルミ製のシーネに比べて
自由自在なモールドイングが可能。
患部の的確な固定と患者様のQOLの
向上が図れます。

「つなぐ・ささえる」

常に医療現場様のニーズに合わせて商品の設計・開発・改良を行っております

※1 自社製品比較

ALLONE SPLINT

オールワン スプリント



手順書

作製手順



開封



水に浸す



水気をふき取る



モールディング

★ 製品全体にしっかりと水を含ませて下さい。

使用例



母指の固定



中節骨の固定



趾骨の固定



末節骨の固定

サイズラインナップ

一般医療機器 / 医療機器届出番号: 44B3X10001000011
JMDNコード: 33056000

サイズ		商品コード	JANコード	入数(枚)	定価
(inch)	(cm)				
0.5	1.25×20	AL0520SF	4580307861406	10	¥13,440
1	2.5×20	AL1020SF	4580307861420	10	¥13,440
1	2.5×30	AL1030SF	4580307861444	10	¥19,040
1.5	3.75×20	AL1520SF	4580307861468	10	¥15,680
1.5	3.75×30	AL1530SF	4580307861482	10	¥22,400

JHM 日本ヒューマンメディック株式会社

〒870-0848 大分市賀来北2丁目16番34号

TEL: 097-549-4140 FAX: 097-549-7470



詳しい製品情報は下記ホームページにも掲載しております。

<http://www.hyuman.co.jp>