



オールワン リスト スプリント

ALLONE WRIST SPLINT

保険点数
半肢(片側) 780点

手関節の骨折等における支持、固定を目的としています。



左右兼用(左手:青・右手:赤)

左右どちらの手でもご使用頂くことができます。
左右兼用にする事で在庫管理が簡便になります！

2-in-1
WRIST
SPLINT



シンプルなデザイン

使用する際に一目で左手・右手でつけ方が分かりやすい
青・赤のデザインを採用しております。
患者様自身も安心してスムーズに装着して頂けます。

SIMPLE
DESIGN



3パターンの固定方法

掌側と背側にそれぞれシーネポケットがついております。
症例によって、掌側固定・背側固定・両側固定の3パターン
から選択することができます。

SECURE



構成品 (1セット)



- ・ホルダー
- ・ギブスシーネ x 2
- ・手順書 (医療従事者用)
- ・手順書 (使用者用)

2 SPLINT
INCLUDED

規格

商品名	商品コード	サイズ	適用範囲*	JANコード	入数
オールワン リスト スプリント	AWS-2	M	21.0 ~ 24.0 cm	4580307865817	1 セット
オールワン リスト スプリント	AWS-3	L	24.0 ~ 27.0 cm		4580307865824

*計測部位：掌の周径 (拇指 MP 関節を含む)

特許取得 (特許第 6630904 号)

医療機器届出番号：44B3X10001000011 (クラス I)

ALLONE WRIST SPLINT

A 背側固定

B 掌側固定

C 両側固定

3パターン 装着手順書

準備パート

STEP 1: シーネの準備



アルミパウチを開け、
パウチからシーネを取り出します。



シーネ全体が水を含みまで
浸します。



水からシーネを出し、
タオル等で水気をふきとります。

STEP 2: 装着パターンを選択

A 背側固定



背側シーネカバーを
開きます。



水気をふき取ったシーネを
シーネポケットに挿入します。

※左手装着の際には青いポケットに、
右手装着の際には赤いポケットに
挿入して下さい。




背側シーネカバーを
閉じます。

B 掌側固定



掌側シーネカバーを
開きます。

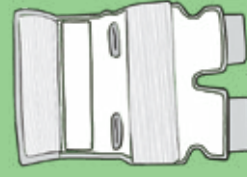

水気をふき取ったシーネを
挿入します。



掌側シーネカバーを
閉じます。

C 両側固定

上記の背側固定及び掌側固定をご参照の下、両側にシーネを挿入して下さい。

装着パート


STEP 3: 患者様へ装着



親指穴に患者様の親指を通します。
※左手装着の際には青い穴、
右手装着の際には赤い穴に通して下さい。



補助ベルトを締めます。

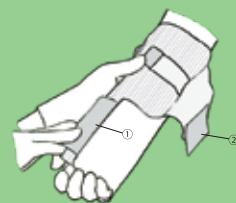

固定ベルトを締めます。
最後に、固定する肢位を保持
しながらモルディングをします。

製造販売元

JHM 日本ヒューマンメディック株式会社

〒870-0848 大分市賀来北2丁目16番34号

TEL : 097-549-4140 FAX : 097-549-4822



<http://www.hyuman.co.jp> 詳しい製品の情報は

日本ヒューマンメディック

検索

ホームページにも掲載しております。

●お問い合わせは