

● 使用手順

※ ---: 内袋と外袋の境界線(実物には書かれておりません)



外袋の開封口を、内袋を触らないようにゆっくりと注意深く剥がして下さい。



器械出しスタッフは外袋に触れないように内袋を取り出します。



ノズルを袋から取り出し、本体に(カチッと音がするまで)セットします。




経皮チップを使用する場合、先端のキャップを外してください。



針のキャップを外し、生理食塩水バッグに針を刺してください。



吸引器に吸引チューブを繋げます。

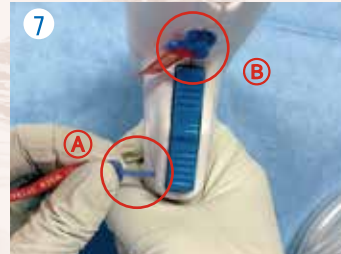

トリガーの安全ピン(A)とLEDライトのストッパー(B)を外してください。



用途に応じて強弱を調整して、使用してください。

● クリーニングロッドの使い方



チップが詰まった場合、チップにクリーニングロッドを挿入し、詰まりを取り除いて下さい。



本体部が詰まった場合、チップを外し、クリーニングロッドを吸引部(下側の穴)に挿入し、詰まりを取り除いてください。

● 本体の処分方法



後部のキャップを外します。



連結部を外し、本体とバッテリーをそれぞれ廃棄してください。

● セット詳細

商品名	商品コード	入数	JANコード
オールワン ラバージ スパイン	3500S1	1セット	4580307862892

● 基本構成 (3500S1)

商品コード	商品名	JANコード	備考
3500S1	オールワン ラバージ スパイン	4580307862892	本体
LT01K	コーンチップ Φ75mm	4580307862922	扇状噴霧
CTB	経皮チップ 100mm	4580307865893	放射噴霧
HA250	クリーニングロッド 285mm	4580307866029	目詰まり除去用

● アクセサリー (オプション品)

商品コード	商品名	JANコード	備考
※ST01K	コーンチップ Φ30mm	4580307866043	扇状噴霧
※MT01K	コーンチップ Φ50mm	4580307862915	扇状噴霧
※HA100	ハイドラコネクター 380mm	4580307866005	3バッグ用

製造販売元

JHM 日本ヒューマンメディック株式会社

〒870-0848 大分市賀来北2丁目16番34号

TEL: 097-549-4140 FAX: 097-549-7470

詳しい製品の情報は下記ホームページにも掲載しております。




<http://www.hyuman.co.jp>

日本ヒューマンメディック

検索

- J M D N コード 37026000
- 管理医療機器 クラスⅡ
- 医療機器認証番号 230ADBZX00096000

セット内容	
	本体
	LT01K
	CTB
	クリーニングロッド

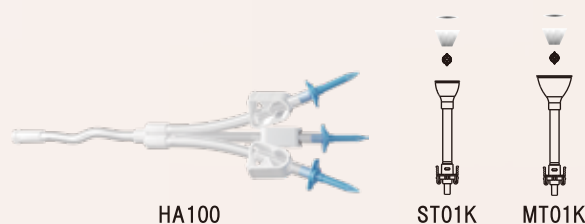

※受注生産品

脊椎脊髄外科用パルス洗浄器

ALLONE LAVAGE SPINE オールワン ラバージ スパイン



JHM 日本ヒューマンメディック株式会社

脊椎脊髄外科用パルス洗浄器

バッテリー内蔵でコンパクトなデザインのオールワンラバージに
脊椎脊髄外科症例に適したデザインのチップが誕生！



① 同時吸引可能

吐出と吸引が同時に可能な
ディスポ洗浄器です。

② ON・OFF可能なLEDライト



③ ワンタッチノズル

チップのつまみを操作する事
により簡単に着脱が可能です。

④ 流量切替

ハイスピードとロースピード
モードの二段階の流量をワン
タッチで切替えられます。

⑤ バッテリー内蔵


動線確保に優れ、安全に取り
出し廃棄できます。

様々な脊椎手術に合わせた 新型チップ

扇状噴霧タイプコーンチップ(LT01K)



側弯症をはじめとする皮切の大きな症
例に向いており、柔らかい材質のため
体内を愛護的に洗浄出来ます。

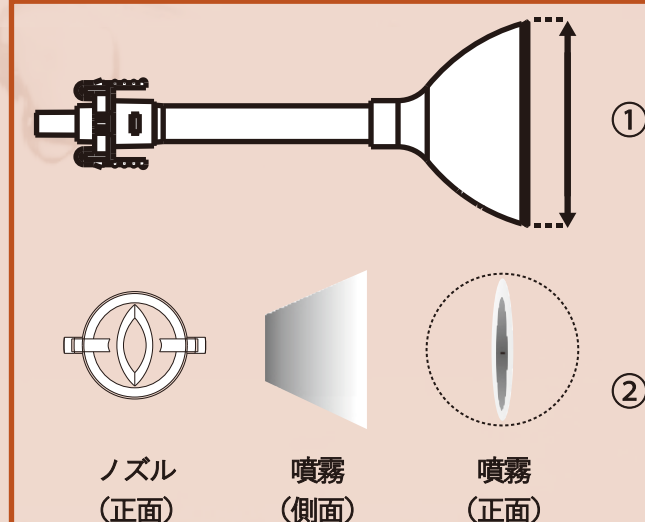


詳細：

- ① コーンチップ直径 : 75mm
- ② ノズルタイプ : 扇状噴霧

放射噴霧タイプ経皮チップ(CTB)



PPSを使用するMISに向いています。
経皮内で生食の吐出と吸引を同時に
行えます。100mm経皮チップは優れ
たフィット性を持っています。

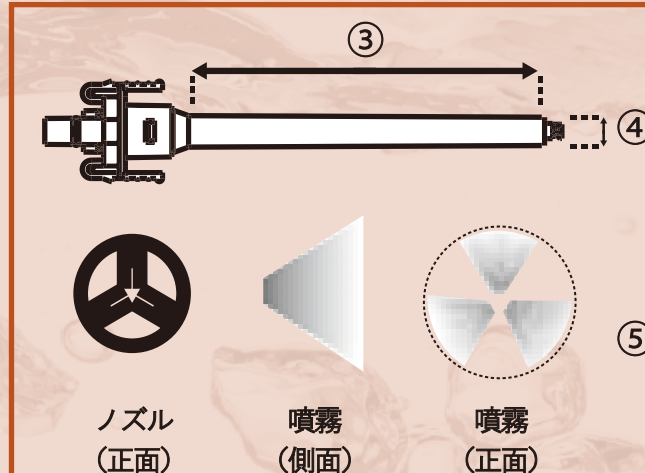

詳細：

- ③ 長さ : 100mm
- ④ 外径 : 9mm
- ⑤ ノズルタイプ : 放射噴霧

洗浄にかかる手間を大幅に軽減できます！